

## Merkblatt Liquordiagnostik

### I. Präparation und Versand von Liquor

Für die zytologische und immunhistochemische Beurteilung von Liquor und Zystenpunkaten ist die Einsendung von ungefärbten Zytospinpräparaten (ca. 6 – 8 beschichtete Objektträger) zu empfehlen. *Alternativ* kann bei kurzen Transportwegen (unter 1 Stunde) der native, unfixierte Liquor/Zystenpunktat (telefonische Ankündigung), bei längerem Transportweg fixierter Liquor/Zystenpunktat (Fixation: 1:1 mit 70% Alkohol; um eine Autolyse der Zellen zu vermeiden) versendet werden.

Durchflusszytometrische Diagnostik (FACS) zum Klonalitätsnachweis erfolgt im **Institut für Laboratoriumsmedizin, Feulgenstr. 12, 35392 Gießen.**

### II. Probenannahme: Montag bis Freitag 7.30-14.30 Uhr

### III. Kontakt

<b>Eingangslabor:</b>	Fr. Schmidt/ Fr. Stephan	Tel. 0641/99-41192 (gudrun.schmidt@uk-gm.de) (chiana.stephan@uk-gm.de)
<b>Sekretariat:</b>	Frau Adolph/Frau Cullu	Tel. 0641/99-41181 (neuropathologie@uk-gm.de)

**Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Probengefäße, Versandboxen und Fixationslösungen können bei uns angefordert werden.**