

Merkblatt Nervenbiopsie

Nervenbiopsie

1. Ca. **1,5 cm lange** Nervenbiopsie.
2. Vorsicht bei der Entnahme. Quetsch- und Zugartefakte vermeiden.
3. **Unfixiert:** Native Biopsie in ein fest verschlossenes Gefäß geben ggf. auf beschichteten Tupfer. **Keine NaCl- oder Ringerlösung benutzen!** Die unfixierte Probe möglichst schnell in das Institut bringen, um Austrocknung zu vermeiden.
4. **Fixiert:** Biopsie quer teilen und in einen Teil in **4%-Formalin (gepuffert)** und einen Teil in **3,9%- Glutaraldehyd** geben. **Fixierte** Proben können in einer speziellen Versandbox einfach **per Post** verschickt werden. Probengefäße und Versandboxen können bei uns angefordert werden.

Kontakt:

Muskellabor: Frau Roth/Frau Leib

0641/99-41194
(Angela.Roth@patho.med.uni-giessen.de)
(Kerstin.Leib@patho.med.uni-giessen.de)

Sekretariat: Frau Adolph/Frau Cullu

0641/99-41181
(neuropathologie@uk-gm.de)

Adresse:

**Institut für Neuropathologie
-Muskellabor -
Arndtstraße 16
35392 Gießen**